



## Tubo AST Broth

Fluido usado na preparação de inóculo para o teste de sensibilidade de bactérias no sistema automatizado Phoenix. Pode ser usado nos painéis AST ou nos painéis Combo (ID/AST).

### Princípio de Ação

Através de uma quantidade pré determinada de fluido e da quantidade certa de colônias puras retiradas do meio sólido, conseguimos obter um padrão correto (0,5 a 0,6 da escala de Mac Farland) que já é pré estabelecido de acordo com as concentrações de substratos existentes no painel e que proporcionará um resultado correto na identificação dos microrganismos. A partir deste inóculo, usamos uma quantidade também pré determinada e uma solução indicadora de AST, num tubo com fluido de inóculo específico para o teste de sensibilidade no equipamento Phoenix.



## Tubo ID Broth

Fluido utilizado na preparação de inóculo para identificação de bactérias no sistema automatizado Phoenix.

### Princípio de Ação

Através de uma quantidade pré-determinada de fluido e da quantidade certa de colônias puras retiradas do meio sólido, conseguimos obter um padrão correto (0,5 a 0,6 da escala de Mac Farland) que já é pré estabelecido de acordo com as concentrações de substratos existentes no painel e que proporcionará um resultado correto na identificação dos microrganismos.

